



Lapiena[®]

Hochwertiger, quervernetzter Hyaluronsäure-Dermalfiller mit Lidocain


LAPIENA PRODUKTLINIE

LAPIENA steht für eine umfassende ästhetische Gesichtsbehandlung, maßgeschneidert auf Ihre persönlichen Wünsche. Verwirklichen Sie Ihre natürliche Schönheit mit unseren hochreinen Hyaluronsäure-Fillern.

	CLASSIC	DEEP	Sub-Q
INHALTSSTOFFE	vernetzte Hyaluronsäure Lidocain 0,3%	vernetzte Hyaluronsäure Lidocain 0,3%	vernetzte Hyaluronsäure Lidocain 0,3%
HYALURONSÄURE GEHALT	20 mg/ml		
LIDOCAIN GEHALT	3 mg/ml		
EMPFOHLENE BEHANDLUNGS- BEREICHE	Lippen, unter den Augen vorderer Wangenbereich Nasolabialfalten Jochbein feine Fältchen	Lippen, Nasolabialfalten Schläfen, tiefe Falten Stirn, Zornesfalten	Nasenrücken, Nasenspitze Nasolabialfalten Stirn Wangen, Kinn
VERPACKUNGS- INHALT	1 x 1 ml Spritze 1 x 27G Nadel 1 x 30G Nadel	1 x 1,1 ml Spritze 1 x 25G Nadel 1 x 27G Nadel	1 x 1,1 ml Spritze 1 x 25G Nadel 1 x 27G Nadel



Classic

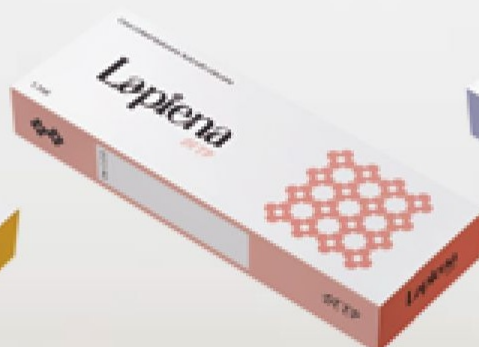

Deep



Sub-Q



PREMIUM-DERMALFILLER MIT LIDOCAIN



CE-Kennzeichnung, ISO 13485

LAPIENA ist CE-zertifiziert und entspricht den strengen Anforderungen der EU für Medizinprodukte der Klasse III. Dies bestätigt die Einhaltung höchster Standards in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz.



Zugelassener Inhaltsstoff

Die eingesetzte Hyaluronsäure ist von pharmazeutischer Qualität und erfüllt höchste Sicherheits- und Reinheitsstandards. Sie ist im Drug Master File (DMF) der US-amerikanischen FDA registriert und besitzt zusätzlich eine Zertifizierung der EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines).



HCCL™ Technologie

Die klinische Sicherheit und Effektivität von Lapiena wurden im Rahmen einer vergleichenden Studie wissenschaftlich bestätigt.



Bewährte Sicherheit


Das verstärkte 3D-Matrix-Design sorgt für höchste Produktsicherheit und optimiert die rheologischen Eigenschaften für ein natürliches, langanhaltendes Ergebnis.

HCCL™ Technologie

LAPIENA wird unter Verwendung der „HCCL™-Technologie“ hergestellt, welche die Produktsicherheit durch einen hohen Vernetzungsgrad erhöht und potenzielle Fremdstoffreaktionen minimiert (niedrige BDDE-Werte).

Die Anwendung von Niedrigtemperatur und der verlängerte Vernetzungsprozess sorgen für eine schonendere Produktion und eine bessere Produktqualität.

Der patentierte Polymerprozess gewährleistet eine gleichmäßige und stabilisierte 3D-Netzstruktur, die es jedem LAPIENA-Produkt ermöglicht, das gewünschte Volumen und die Form langfristig zu erhalten.

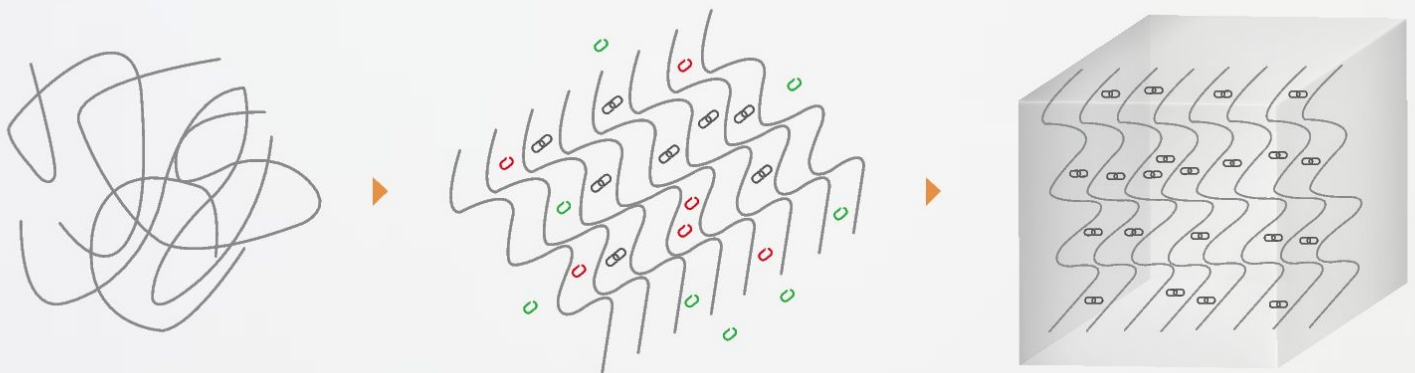

-  vernetztes BDDE
-  pendantes BDDE
-  nicht reagiertes BDDE
-  Hyaluronsäure


Optimale rheologische Eigenschaften

LAPIENA ist ein hochkonsistentes, monophasisches Produkt mit einer stabilen und gleichmäßigen Gelstruktur. Durch die präzise Kontrolle des Phasenwinkels (δ) und des Speichermoduls (G') wird die Viskoelastizität gezielt verbessert, was die äußere Widerstandsfähigkeit des Gels zusätzlich steigert.



ALLGEMEINER LEITFADEN ZUR INJEKTION


LAPIENA CLASSIC

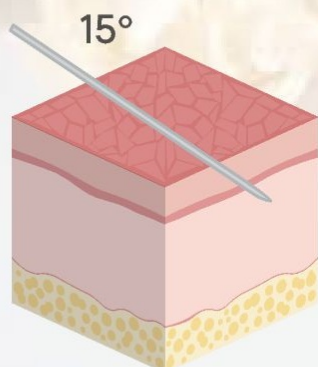

In die obere Dermis
in einem Winkel
von etwa 15°.

LAPIENA CLASSIC ist die weichste und dünnste Variante der LAPIENA-Produktlinie und wurde speziell zur Korrektur feiner bis moderater Falten entwickelt.


LAPIENA DEEP

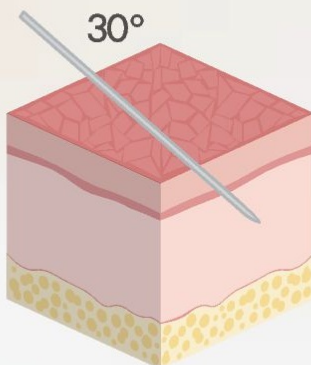

In die mittlere bis tiefe
Dermis in einem Winkel
von etwa 30°.

LAPIENA DEEP verfügt über verbesserte viskoelastische Eigenschaften und ist ideal zur Behandlung tiefer Falten sowie zur Wiederherstellung natürlichen Volumens in bewegten Gesichtsbereichen.

LAPIENA Sub-Q

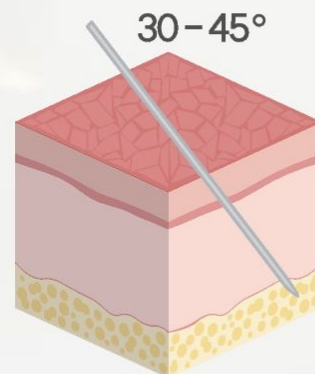

In die tiefe Dermis
und bis zum Periost
in einem Winkel von
etwa 30–45°.

LAPIENA Sub-Q ist die festeste Formulierung und wurde speziell zu dem Wiederherstellen der Gesichtskontur und Ausgleich von Volumenverlust entwickelt.

DIE LÖSUNG FÜR INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE

LAPIENA wurde entwickelt, um durch die HCCL™-Technologie ein optimales Gleichgewicht aus Kohäsivität, Elastizität und Plastizität zu sichern. Die Produkte ermöglichen präzise, individuell abgestimmte Behandlungen spezifischer ästhetischer Bedürfnisse – einzeln oder in Kombination.

LAPIENA Classic

Kohäsivität * * *

Elastizität * * *

Plastizität * * *

LAPIENA Deep

Kohäsivität * * *

Elastizität * * *

Plastizität * * *

LAPIENA Sub-Q

Kohäsivität * * *

Elastizität * * *

Plastizität * * *

Kohäsivität – Zusammenhalt des Gels – wichtig für Formstabilität im Gewebe

Elastizität – Rückstellkraft – das Gel kehrt nach Druck oder Bewegung in seine Ursprungsform zurück

Plastizität – Formbarkeit – ermöglicht präzises Modellieren und individuelle Konturierung

KLINISCHE ERGEBNISSE

Unsere klinische Studie ermöglichte eine valide und nachvollziehbare Einschätzung sowohl der Faltenreduktion als auch der ästhetischen Verbesserung im Laufe der Behandlungszeit. Lapiena ist dem Referenzprodukt* in seiner Wirksamkeit nicht unterlegen.

(*Das Referenzprodukt ist von der US-FDA zugelassen.)

Testmethode

Zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von LAPIENA wurde eine klinische Studie mit 68 Patient:innen durchgeführt. Dabei erfolgte die Injektion des Produkts in die Nasolabialfalten. Die ästhetischen Ergebnisse wurden über einen Zeitraum von 24 Wochen anhand der Wrinkle Severity Rating Scale (WSRS) und der Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS) von unabhängigen, erfahrenen Gutachtern bewertet.

Sicherheitsbewertung

LAPIENA wurde in klinischen Tests als sicheres Medizinprodukt eingestuft; es traten keine klinisch relevanten Auffälligkeiten auf.

Patientenzufriedenheit

Die Zugabe von Lidocain sorgt während der Behandlung für eine schmerzlindernde Wirkung und erhöht dadurch den Komfort für die Patient:innen deutlich.



Laut Umfrage des Herstellers

EMPFOHLENE BEHANDLUNGSBEREICHE

LAPIENA

Classic

- Krähenfüße
- Zornesfalten
- Lippenfältchen (Raucherfältchen)
- Stirnfalten
- Tränenrinne/Tränenfurche
- Ohrläppchenverjüngung /-augmentation
- Lippenkonturierung
- Marionettenfalten

LAPIENA


Deep

- Nasolabialfalten / Nasenlippenfalten
- Marionettenfalten
- Lippenaufbau / Lippenvolumisierung
- Zornesfalten
- Stirnfalten

LAPIENA

Sub-Q

- Wangenaufbau
- Nasenkorrektur ohne OP
- Kinn-Kiefer-Konturierung
- Jawline-Optimierung
- Stirnaufbau / Stirnkonturierung

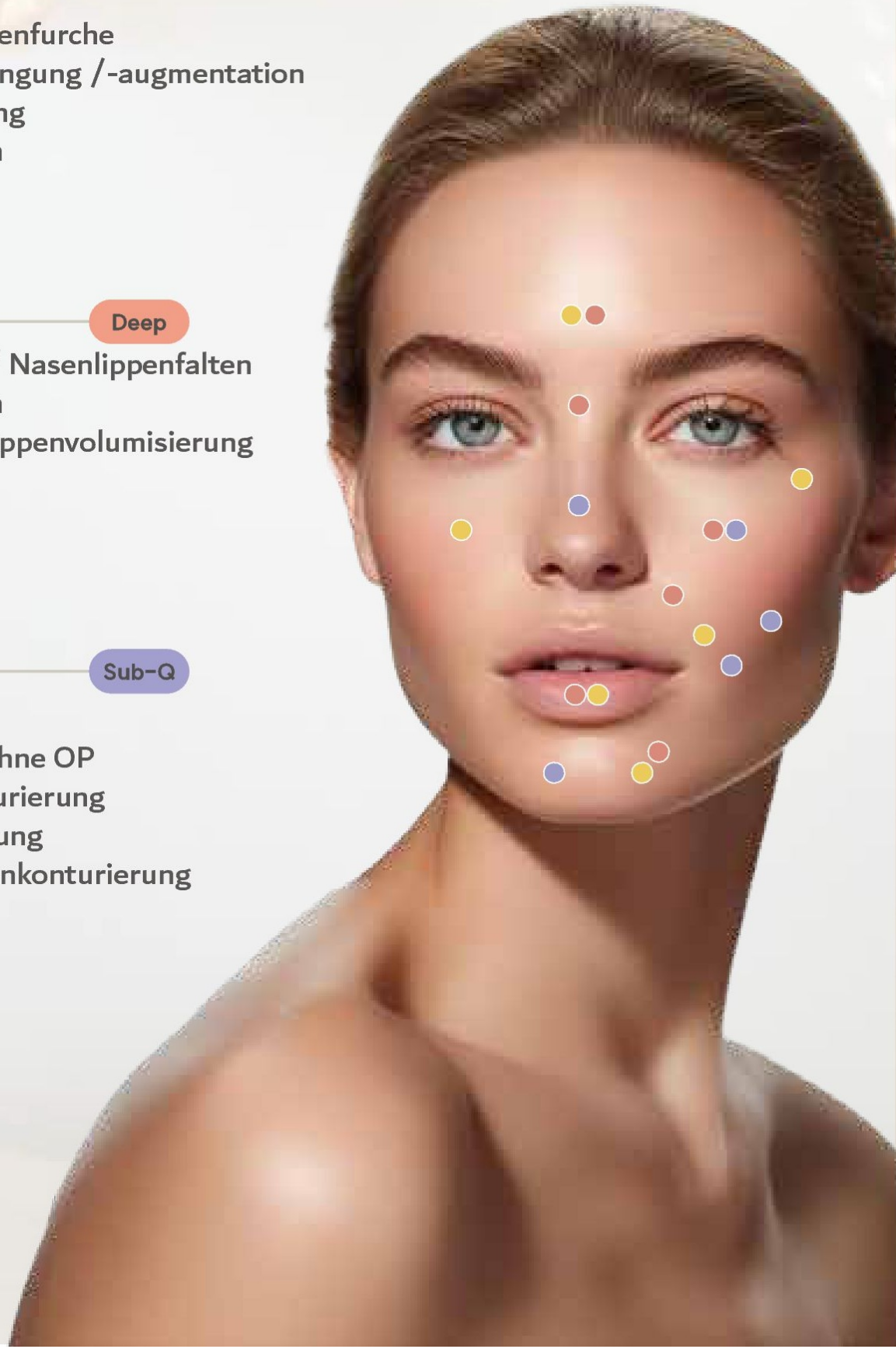



Exklusiver Vertrieb für Deutschland und Österreich:
Stadt-Apotheke Frankfurt
Tel.: + 49 (0)69783127
Fax: + 49 (0)697892407
Email: info@stadt-apotheke-frankfurt.de
Web: www.stadtapotheke-frankfurt.de

 HJ corporations